



## Emballage de stérilisation SMMS

**Nom:** Emballage de stérilisation en tissu

**Dimensions:** (12~24) = po x (12~24) po

**Matériau:** Textile non tissé SMMS (couches filées-liées et extrudées soufflées)

### UTILISATION PRÉVUE:

Cet emballage de stérilisation est conçu pour l'utilisation dans les processus de stérilisation communs (vapeur, OE). Il est fait à partir de textile non tissé SMS / SMMS / SSMMS de qualité médicale et est destiné à contenir des dispositifs ou équipements médicaux devant être stérilisés par un professionnel de santé selon les protocoles de stérilisation validés. Les emballages permettent d'obtenir une stérilisation adéquate du contenu tout en préservant sa stérilité jusqu'à son utilisation.

### INSTRUCTIONS:

- Les produits doivent être utilisés selon les recommandations de préparation, d'emballage et de stérilisation provenant de :
  - ANSI/AAMI ST79: *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities*
  - ANSI/AAMI ST41: *Ethylene Oxide Sterilization in Health Care Facilities*
  - AORN *Standards, Recommended Practices, and Guidelines*
- Si la méthode à deux couches et la technique d'emballage simultané sont utilisées, le premier pli doit être suffisamment étiré pour couvrir complètement la surface des articles afin de garantir le maintien de la stérilité.
- Fixer les emballages avec du ruban indicateur de stérilisation ou une autre méthode de fermeture adaptée à la méthode de stérilisation utilisée.
- La fermeture doit permettre au stérilisant de pénétrer dans l'emballage et éviter de comprimer le paquet afin de garder son intégrité.
- Laisser que les emballages se sèchent et se refroidissent complètement avant de les retirer de la chambre du stérilisateur pour éviter de compromettre la stérilité de l'emballage.
- Inspecter visuellement les articles emballés lorsqu'ils sortent de la chambre de stérilisation. Les articles dont l'emballage est déchiré, humide ou endommagé ne doivent pas être utilisés. Si l'une de ces conditions est constatée ou si l'intégrité de l'emballage est compromise, retraiter le contenu avec un nouvel emballage.
- Les emballages doivent être conservés dans un endroit propre, sec et bien aéré.
- Pour maintenir la stérilité et minimiser le risque de contamination croisée, les emballages doivent être ouverts au fauteuil au point d'utilisation.

### CONSERVATION:

Les produits doivent être conservés dans un endroit fermé, étanche, ventilé et sec.

**Humidité relative:** Moins de 70% ; **Température:** Moins de 24°C.

### PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou si des matières externes particulières sont identifiées avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser le contenu emballé si l'emballage de stérilisation est déchiré, sale ou suspecté d'avoir été maltraité.
- Ce produit est à USAGE UNIQUE. NE PAS RÉUTILISER. ☒
- Il n'est pas conçu pour être utilisé avec la stérilisation par chaleur sèche ou par radiation (p. ex. gamma, faisceau d'électrons [E-beam] ou autre).

L'emballage de stérilisation préserve la stérilité des dispositifs jusqu'à 6 mois après la stérilisation à la vapeur ou au gaz EO et sa durée de conservation maximale avant la stérilisation est de 5 ans à partir de la date de fabrication.

**#60190**  
SMMS 12" x 12"  
(1000 la boîte)

**#60191**  
SMMS 15" x 15"  
(1000 la boîte)

**#60192**  
SMMS 20" x 20"  
(500 la boîte)



**maxill inc.**

80 Elm Street, St. Thomas, ON N5R 6C8  
Sans frais: 1-800-268-8633  
Téléphone: 1-519-631-7370 Télécopieur: 1-519-631-3388