

Zymax™

Solution de nettoyage enzymatique

Flacon pulvérisateur (Prêt à l'emploi)

#60014
Flacon
pulvérisateur
946 mL



Zymax est un détergent enzymatique général prêt à l'emploi conçu spécialement pour nettoyer les surfaces, tissus, instruments et véhicules qui risquent d'être contaminés par des liquides organiques comme du sang, des muqueuses, de l'urine, de la transpiration, du vomi, etc. Les enzymes de Zymax attaquent ces matières organiques en faisant appel à un procédé naturel écologique et sans danger pour l'environnement. Zymax n'est pas nocif pour les humains ni les animaux et n'endommage pas le métal, le plastique, le verre ni les conduits de plomberie.

MODES D'EMPLOI RECOMMANDÉES

TISSUS: Enlevez tous les débris de la région. Vaporiser Zymax sur la surface à traiter et laisser agir pendant 5 minutes. Assécher.

SURFACES: Enlevez tous les débris de la région. Vaporiser uniformément Zymax à la région et laisser agir pendant 5 minutes. Essuyer la surface ou rincer avec de l'eau. **ZYMAX N'EST PAS UN DÉSINFECTANT.**

NE PAS MÉLANGER ZYMAX AVEC D'AUTRES NETTOYANTS PENDANT SON APPLICATION.

ENTREPOSAGE: Conserver dans un lieu à température ambiante. Garder hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS: Peut causer l'irritation aux yeux et à la peau. Éviter de respirer les embruns. Si une irritation se développe et persiste, contacter votre médecin.



SPALDING'S
CLASSIFICATIONS

maxill inc.

80 Elm Street, St. Thomas, ON N5R 6C8

Sans frais: 1-800-268-8633

Téléphone: 1-519-631-7370 Télécopieur: 1-519-631-3388