

**Zymax<sup>™</sup> 128****Solution de nettoyage enzymatique**#60035  
Bouteille de  
1 litre

Zymax 128 est un détergent polyvalent et compatible avec de nombreux matériaux, notamment les plastiques, le caoutchouc, l'acier inoxydable et les tissus souillés par des débris organiques. En cas de doute, effectuez d'abord un test de compatibilité. Les solutions de travail peuvent être utilisées pour le trempage des instruments, dans les unités à ultrasons et dans les systèmes d'évacuation. Consulter les manuels d'utilisation de l'équipement avant utilisation.

**MODE D'EMPLOI:**

Diluer 1 partie de Zymax 128 dans 127 parties d'eau, à température ambiante. Par exemple, mélanger 15 mL / ½ oz de Zymax 128 avec de l'eau pour obtenir une solution de 1,9 L/2 qt. Ne pas ajouter d'autres produits chimiques. La solution usée peut être jetée dans l'évier en faisant couler l'eau du robinet en même temps. La solution doit être changée quotidiennement ou lorsqu'une utilisation intensive affecte ses performances.

**NETTOYAGE MANUEL ET TREMPAGE DES INSTRUMENTS:**

Trempier les instruments pendant 5 à 10 minutes dans la solution de travail. Un temps supplémentaire peut être nécessaire pour le sang séché et d'autres débris protéiques. Ne pas laisser les instruments dans la solution pendant plus de 30 minutes. Immerger complètement les instruments et éponger la solution dans tous les creux et crevasses. Après le trempage, vérifier visuellement la propreté du matériel et le rincer abondamment à l'eau tiède. Sécher les instruments avant la désinfection ou la stérilisation.

**ATTENTION**

Provoque une irritation cutanée  
Provoque une légère irritation oculaire

Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas se toucher les yeux.  
En cas d'irritation cutanée: Demander une aide médicale.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en port et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander une aide médicale.

SPALDING'S  
CLASSIFICATIONS**maxill inc.**

80 Elm Street, St. Thomas, ON N5R 6C8  
Sans frais: 1-800-268-8633  
Téléphone: 1-519-631-7370 Télécopieur: 1-519-631-3388