

Zymax^{LF}**Nettoyant enzymatique cinétique peu moussant**#60034
Bouteille de
1 litre**MODE D'EMPLOI :**

Agiter avant chaque utilisation. Pour distribuer le produit, desserrer le capuchon du compartiment de mesure sur le bidon (une fois le sceau retiré). Comprimer doucement le bidon pour ajouter du liquide dans le compartiment de mesure jusqu'au montant désiré. Retirer le bouchon et verser. Gardez le bouchon bien fermé sur le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Diluer 1 partie Zymax avec 127 parties d'eau à température ambiante (p. ex. mélanger 15 mL/½ fl oz de Zymax LF avec de l'eau, créant une solution de 1,9 L/2 pintes. Ne pas ajouter d'autres produits chimiques. La solution devrait être changée quotidiennement ou lorsque l'utilisation intensive affecte les résultats.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE DES INSTRUMENTS :

Tremper les instruments pendant un minimum de 2 minutes. Un temps de trempage plus long peut s'avérer nécessaire pour de la matière dure ou séchée. Faire passer la solution à travers les canaux pour assurer un nettoyage en profondeur. Rincer les instruments en aspirant de l'eau à travers tous les canaux et charnières. Rincer complètement la solution des instruments. Sécher les instruments avant de continuer avec la désinfection. Suivre les instructions du fabricant pour chaque stérilisation. Jeter le détergent après chaque utilisation ou lorsqu'il est visiblement contaminé.

INSTRUCTIONS POUR NETTOYER L'ÉQUIPEMENT D'ÉVACUATION :

1. Préparer 1,9 L/½ gallon de solution.
2. Circuler via le tuyau d'évacuation pendant 90 secondes pour éliminer les déchets organiques et les odeurs du système du point d'admission aux siphons collecteurs.
3. Un nettoyage quotidien répété peut être conseillé.

ATTENTION

Provoque une légère irritation cutanée
Provoque une irritation oculaire

Se laver les mains et la peau exposée après manipulation. Ne pas se toucher les yeux.

En cas d'irritation cutanée: Demander une aide médicale.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en port et si elle peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander une aide médicale.

Conserver à température ambiante. Garder hors de la portée des enfants.

SPAULDING'S
CLASSIFICATIONS**maxill inc.**

80 Elm Street, St. Thomas, ON N5R 6C8

Sans frais: 1-800-268-8633

Téléphone: 1-519-631-7370 Télécopieur: 1-519-631-3388