

maxill u-test *SI-LR*

Indicateurs intégrateurs pour la surveillance des emballages

Instructions d'utilisation

1. L'étiquette peut être remplie à la main à l'aide d'un stylo.
2. Placez l'indicateur au centre de l'emballage ou du récipient (l'endroit le plus difficile à stériliser). Vérifier avec le fabricant si cette phrase est conforme à l'utilisation prévue du produit.
3. Lancez le programme de stérilisation. À la fin du cycle de stérilisation ou après avoir ouvert l'emballage, retirez l'indicateur et vérifiez le résultat :
 - Si l'indicateur a pris sa couleur finale (voir l'étiquette pour connaître la couleur finale), la stérilisation a été réussie.
 - Si la couleur n'a pas pris la teinte finale, le succès du processus de stérilisation ne peut être garanti. Le contenu de l'emballage **ne doit pas** être utilisé.
4. Tous les indicateurs sont adhésifs et peuvent être collés sur la fiche de traçabilité du patient afin de consigner la stérilisation des instruments.

Stockage et élimination

1. Pour une conservation de longue durée, conservez tous les indicateurs dans leur emballage d'origine.
2. Conservez les indicateurs à une température comprise entre 5 et 30 °C (41 et 86 °F) et à un taux d'humidité relative compris entre 5 et 80 %.
3. Les vapeurs de produits chimiques, en particulier celles du peroxyde d'hydrogène, peuvent altérer l'indicateur avant ou après la stérilisation. Par conséquent, ne les stockez pas avec d'autres produits chimiques.
4. Ces indicateurs ne doivent pas être utilisés après la date de péremption. Ils peuvent être jetés avec les déchets ménagers.

Consignes de sécurité

Les indicateurs de surveillance ne remplacent pas la validation de base conformément aux normes nationales et/ou internationales. Respectez les instructions prévues par la réglementation locale.

AVERTISSEMENT

NE COUPEZ PAS LA BANDELETTE DANS LE SENS DE LA LONGUEUR POUR EN FAIRE DEUX BANDELETTES, CAR CELA COMPROMETTRAIT SA FONCTION D'INDICATEUR CHIMIQUE DE CONTRÔLE DE LA STÉRILISATION.

#81125 - 260 par sac
 #81117 - 500 par sac
 #81118 - 1,000 par sac
 #81119 - 2,500 par sac
 #81121 - 5,000 par sac
 #81127 - 10,000 par sac



SPALDING'S
CLASSIFICATIONS

maxill inc.

80 Elm Street, St. Thomas, ON N5R 6C8

Sans frais: 1-800-268-8633

Téléphone: 1-519-631-7370 Télécopieur: 1-519-631-3388