

maxill Bib Clipz

Attaches en silicone autoclavables pour bavoir
(2 attaches le sac)

#54201 - Bleu marine
#54202 - Bleu pâle
#54203 - Vert
#54204 - Lavande



CLASSIFICATION DE SPAULDING : Article non-critique; contact avec la peau intacte mais pas les membranes muqueuses. Requiert une désinfection de faible niveau.

UTILISATION PRÉVUE : Pour les professionnels dentaires dans les indications recommandées.

MATÉRIAUX : Silicone de qualité médicale, acier inoxydable

NETTOYAGE : Les articles de soins pour les patients réutilisables non-critiques doivent être désinfectés après chaque utilisation. Nettoyer et désinfecter soigneusement entre chaque utilisation avec un désinfectant approuvé par Santé Canada ou enregistré par l'EPA.

STÉRILISATION À VAPEUR : Autoclavable dans un stérilisateur à vapeur à pré-vidé de classe B jusqu'à 275 °F (135 °C) pendant 4 minutes. Les Bib Clipz DOIVENT être complètement secs avant d'être emballés pour la stérilisation.

AVIS IMPORTANT

Comme avec tout autre composant en acier inoxydable, la corrosion est une possibilité. Il est de la responsabilité du professionnel de la santé d'inspecter tout instrument ou dispositif en acier inoxydable pour détecter toute dégradation (p. ex : rouille, corrosion, piqûres). Si l'intégrité de l'instrument ou du dispositif est compromise, cesser l'utilisation.

Contre-indications

- Les produits de nettoyage contenant du chlore ou du chlore comme ingrédient actif sont corrosifs pour l'acier inoxydable et ne devraient pas être utilisés.
- Ne pas utiliser des méthodes de stérilisation froides (procédés chimiques) pour la stérilisation des Bib Clipz. Ces agents chimiques peuvent causer une corrosion du produit.



SPAULDING'S
CLASSIFICATIONS

maxill inc.

80 Elm Street, St. Thomas, ON N5R 6C8
Sans frais: 1-800-268-8633
Téléphone: 1-519-631-7370 Télécopieur: 1-519-631-3388